

Garantia do Produto

Empresa	Nome do produto	
	Nome do modelo	
	Período de garantia	2 anos após a compra
	Data da compra	
	Local da compra	
	Telefone	
Consumidor	Nome do consumidor	
	Número do consumidor	
	Endereço	

* Favor guardar com cuidado esta garantia. Você receberá o serviço devido apenas se apresentar esta garantia com o local e data da compra.

- A NUGA Medical fornece a garantia deste produto de acordo com as regulamentações da Lei de Proteção ao Consumidor.

- Entre em contato com o representante de vendas local ou com o escritório da NUGA Medical se o produto for danificado.

- Peças sobressalentes do produto serão mantidas em estoque por três anos após o produto ser descontinuado.

- O local da compra deve ser registrado na garantia no momento da compra para receber a manutenção da garantia.

1. A garantia é válida por até dois anos a partir da data da compra, e apenas danos causados por usos normais serão sujeitos a consertos da garantia.

2. O período de garantia é calculado a partir da data da compra e, portanto, solicite que a loja na qual o produto foi comprado registre a data de compra em sua garantia no momento da compra (Quando a data de compra não puder ser verificada, o período de garantia é contado a partir da data após 6 meses da fabricação).

3. Quando o produto for usado para fins comerciais (por exemplo, usado para vendas, em ambiente anormal etc.) ou com propósitos industriais, o período de garantia é reduzido para 6 meses (incluindo as peças reservas essenciais).

4. Esta garantia não pode ser emitida mais de uma vez.

• Os reparos de garantia não são fornecidos nos seguintes casos:

- Quando os danos forem causados por desastres naturais (por exemplo, incêndios, enchentes e ventos)

- Para substituir peças de consumo desgastadas pelo uso normal

- Quando o dano for causado por fonte de energia defeituosa ou falhas na unidade de conexão local

- Outros motivos externos diferentes de falhas no próprio produto.

- Quando os danos são causados por reparos ou modificações feitas por alguém que não seja um funcionário com certificação do escritório local da NUGA Medical ou outro centro de serviços.

Assistência Técnica: (0XX11) 3271-8911.

 **NUGA MEDICAL CO.,LTD.**

<http://www.nuga.kr>




Almofada para coluna vertebral cervical NUGA

 **NUGA MEDICAL CO.,LTD.**
www.nuga.kr


San 2-1, Gagok-ri, Jijeong-myeon, Wonju-si,
Gangwon-do, Korea
Tel : +82-33-730-0001 Fax : +82-33-730-0007

MADE IN KOREA


Almofada para coluna vertebral cervical NUGA

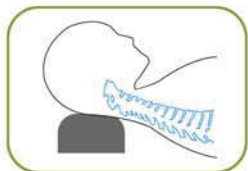

Almofada alta ou dura

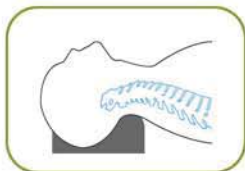

Quando o queixo está apontado para cima

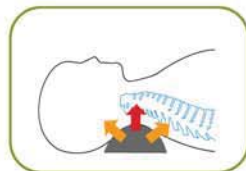

Almofada para coluna vertebral cervical Nuga

A coluna cervical vertebral está em condições normais quando apresenta uma flexibilidade em forma de "C".

Caso a coluna cervical vertebral esteja em posição vertical, a capacidade de absorção de choque é reduzida, o disco que tem como função diminuir o impacto entre os ossos do pescoço está sob pressão contínua e também esmagado, podendo o pescoço estar tenso ou ocorrerem problemas nos discos do pescoço.

Componentes



Almofada para coluna vertebral cervical NUGA
Dimensões : 400X135X75mm
Peso : 650g



Manual do utilizador



**Utilize-a para cuidar da sua saúde.
A almofada de turmânio é confortável
e adequa-se perfeitamente ao corpo humano.**



■ Recomendamos a sua utilização a: ■

Qualquer pessoa que fique cansada por não conseguir dormir bem durante a noite

Estudantes que precisem de um sono curto e confortável ou idosos

Qualquer pessoa que esteja sob stress e não consiga dormir bem

Qualquer pessoa com um problema na coluna vertebral cervical

